

Clenny® A

Soluzione fisiologicasterile
25 flaconcini monodose da 2 ml

Per Aerosolterapia



INDICAZIONI

Clenny A è una soluzione fisiologica sterile, particolarmente indicata in aerosolterapia: quantità predefinita di soluzione fisiologica per la diluizione di farmaci da somministrarsi per nebulizzazione

ATTENZIONE

Attenersi alle istruzioni riportate dal produttore dell'aerosol e a quelle riportate sulle confezioni del farmaco da diluire.

AVVERTENZE

- Il flaconcino, una volta aperto, deve essere utilizzato entro 48 ore;
- non iniettabile;
- per l'uso in aerosolterapia non usare nei pazienti affetti da gravi patologie respiratorie o cardiovascolari;
- non contiene conservanti e pertanto può essere usato anche per lunghi periodi;
- non disperdere nell'ambiente il contenitore dopo l'uso;
- conservare in ambiente fresco, lontano da fonti di calore ed in confezione integra;
- non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

FREQUENZA D'USO

Secondo necessità anche più volte al giorno.


COMPOSIZIONE

Sodio cloruro E.Ph. 18,0 mg Acqua ppi 2,0 ml
Non contiene conservanti.

FACSIMILE
FOGLIETTO
ILLUSTRATIVO

0108000712/01

MODALITÀ D'USO

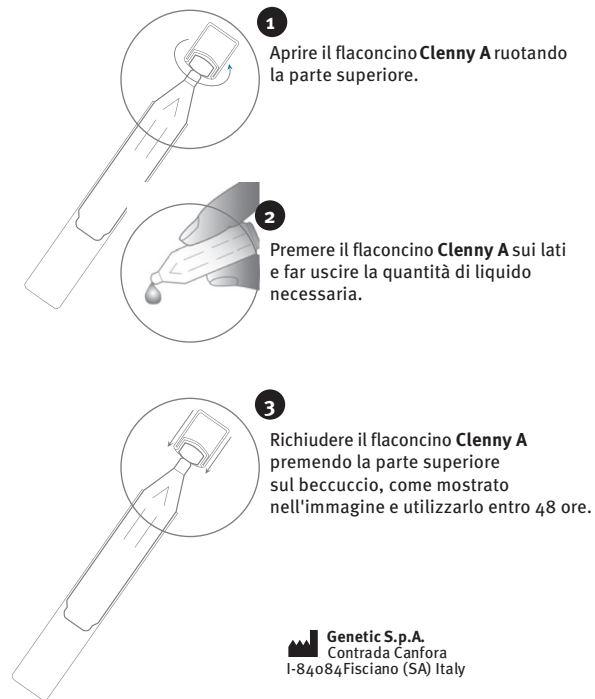

1 Aprire il flaconcino Clenny A ruotando la parte superiore.

2 Premere il flaconcino Clenny A sui lati e far uscire la quantità di liquido necessaria.

3 Richiudere il flaconcino Clenny A premendo la parte superiore sul beccuccio, come mostrato nell'immagine e utilizzarlo entro 48 ore.

 Genetic S.p.A.
Contrada Canfora
I-84084 Fisciano (SA) Italy

Distribuito da:
Chiesi Farmaceutici SpA
Via Palermo 26/A
43122 Parma (PR) Italy

 Chiesi

CE
0373

Ultima revisione del foglietto illustrativo: GENNAIO 2015

0108000712/01

FACSIMILE
FOGLIETTO
ILLUSTRATIVO